


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



W H A L I M A

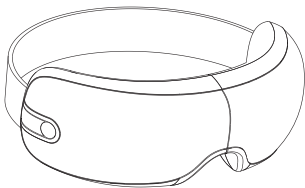

## МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	1
НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА .....	3
Конструкция .....	3
Кнопки управления .....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ .....	5
ЗАРЯДКА .....	6
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ .....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	10

Благодарим Вас за покупку данного устройства.  
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство  
пользователя перед использованием, чтобы обеспечить  
правильную работу.

Пожалуйста, сохраните данное РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ надлежащим образом для  
дальнейшего использования.



## Важные указания по технике безопасности

- Необходим пристальный контроль при использовании данного изделия детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями, а также при использовании рядом с ними.
- Если во время эксплуатации данного изделия Вы почувствуете какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите использование.
- Не используйте устройство, если зарядное устройство или шнур питания повреждены.
- Перед тем как заряжать устройство, убедитесь, что порт зарядного устройства сухой.
- Не используйте и не заряжайте прибор при наличии или возможном наличии влаги.
- Не используйте другие терапевтические устройства вместе с данным изделием.
- Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Избегайте использования массажера в состоянии алкогольного опьянения.
- Не рекомендуется использовать устройство более 15 минут.
- Во избежание повреждения не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- Людям, страдающим заболеваниями глаз или перенесшим операции на глазах, не следует использовать прибор без консультации с врачом.
- Людям с поврежденными кожными покровами вокруг глаз не следует использовать данный массажер.
- Людям с кардиостимуляторами или электронными устройствами, имплантированными в организм, не следует использовать данное устройство.
- Люди со злокачественными опухолями, гипертонией или заболеваниями сердца должны находиться под наблюдением при использовании данного изделия. (Необходим контроль).
- Массажер оснащен функцией нагрева. Людям с пониженной чувствительностью к теплу следует обратить на это внимание.


## Важные указания по технике безопасности

- Людям, страдающим от высокой температуры, не рекомендуется использовать массажер.
- Для достижения наилучшего эффекта от массажа откиньте голову назад во время использования.
- Во избежание поломки изделия не разбирайте его самостоятельно.
- Не пытайтесь ремонтировать или разбирать прибор без соответствующего разрешения.
- Для ремонта обратитесь к официальному дилеру или сервисному агенту.
- Заряжайте массажер только при указанном напряжении.
- Чтобы отсоединить шнур от розетки, не тяните за него. Для этого необходимо использовать пластмассовый наконечник.
- Не повреждайте, не перегибайте, не тяните и не перекручивайте шнур питания.
- Если шнур питания USB поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасности.
- Пожалуйста, используйте соответствующий адаптер (5V1A) и шнур питания для зарядки.

## Конструкция

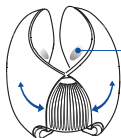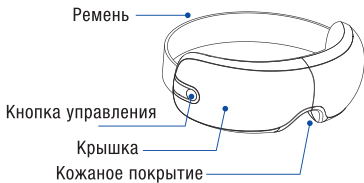


Воздушная подушка

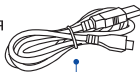

Кабель для зарядки Type-C

Название	Сумка	Кабель для зарядки Type-C	Политиленовый пакет	Руководство пользователя
Количество	1	1	× 2	1

## Кнопки управления

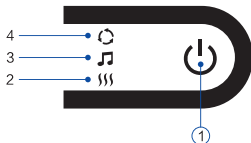

- ① Кнопка включения / выбора режима
- ② Световой индикатор режима нагрева
- ③ Световой индикатор музыкального режима
- ④ Световой индикатор режима Magic



**ОСТОРОЖНО**

По умолчанию прибор работает 15 минут, по истечении этого времени он автоматически выключается. Нажмите кнопку включения / выбора режима для перезапуска.

## Порядок использования



### Кнопка включения / выбора режима

- 1 – Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения, загорится световой индикатор режима Magic, Давление воздуха+Вибрация+Нагрев+Музыка.
- 2 – Короткое нажатие этой кнопки переключает на музыкальный режим, загорится световой индикатор музыкального режима, Давление воздуха+Вибрация+Музыка.
- 3 – Повторное короткое нажатие этой кнопки переключает на режим нагрева, загорится световой индикатор режима нагрева, Давление воздуха+Вибрация+Нагрев.
- 4 – Дважды коснитесь кнопки включения, чтобы выключить успокаивающую музыку.

### Подключение по Bluetooth

- ▶ Подключение в первый раз: включите Bluetooth на мобильном устройстве для сопряжения. При успешном выполнении сопряжения прозвучит сообщение «Bluetooth подключен»; если соединение Bluetooth прервано, также прозвучит голосовое сообщение.
- ▶ После сопряжения массажера при первом использовании нет необходимости повторять процедуру для последующего подключения.

### Способ применения

Прижмите чашечки для глаз к лицу и зафиксируйте их в нужном положении, натяните резинку на голову и отрегулируйте ее до нужной длины.




**ОСТОРОЖНО**

Не запускайте устройство на холостом ходу, чтобы избежать повреждения воздушных подушек. Перед использованием данного прибора снимите головные уборы и контактные линзы.

## Зарядка аккумулятора

- Вставьте штекер адаптера в разъем Type-c на устройстве (см. рисунок ниже).
- Подключите адаптер питания к настенной розетке (100-240 В ~, 50/60 Гц).
- Индикатор музыкального режима непрерывно светится красным цветом при подключении к сети для зарядки.
- После завершения зарядки индикатор непрерывно светится зеленым цветом. Полная зарядка займет 3-5 часов.

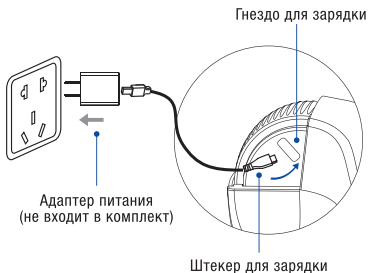

**ОСТОРОЖНО**

- Устройство не работает во время зарядки.
- Пожалуйста, используйте соответствующий адаптер (5V1A) и шнур питания для зарядки.
- Не пережимайте кабель питания во избежание повреждения.



## Уход и обслуживание

- Используйте мягкую ткань для очистки поверхности изделия.
- Очищайте кожаное покрытие от пятен мягкой тканью, смоченной водой.



**ОСТОРОЖНО**

Не используйте медицинский спирт или другие агрессивные жидкости для очистки устройства. Для проведения технического обслуживания отправьте массажер в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.

---

## Хранение

- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, мы рекомендуем упаковывать его в коробку, чтобы уберечь от попадания пыли.
- Не кладите на прибор тяжелые предметы и берегите его от влаги.



**ОСТОРОЖНО**

Пожалуйста, храните изделие вдали от нагревающих поверхностей во избежание возгорания или повреждения изделия. Не допускайте, чтобы дети играли с массажером.

## Пожалуйста, поддержите инициативу по переработке аккумуляторов.

 <p>ОПАСНОСТЬ</p>	<p>Данный продукт содержит специальный перезаряжаемый аккумулятор, не извлекайте его из изделия для зарядки и не используйте его в других устройствах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не подвергайте его воздействию открытого огня во избежание перегрева.</li> <li>▶ Пожалуйста, используйте изделие по назначению во избежание повреждений.</li> <li>▶ Не соединяйте два контакта аккумулятора напрямую проводящим металлом.</li> <li>▶ Не храните данный прибор вместе с ювелирными украшениями или заколками для волос.</li> </ul> <p>Не заряжайте, не используйте и не храните устройство вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву, возгоранию или растрескиванию изделия.</p>
 <p>ОПАСНОСТЬ</p>	<p>Во избежание травм храните извлеченный аккумулятор в недоступном для детей месте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Немедленно обратитесь в больницу, если ребенок проглотил аккумулятор.</li> <li>▶ В случае утечки из аккумулятора не допускайте прямого контакта с кожей во избежание химических ожогов.</li> <li>▶ Если контакт с протекающим аккумулятором произошел, тщательно промойте кожу водой. Попадание на кожу требует тщательного промывания и обращения к врачу.</li> <li>▶ Разбирайте прибор только для утилизации. Для обслуживания обращайтесь к авторизованному дилеру или сервисному агенту.</li> </ul>

После использования аккумуляторы могут быть переработаны.

Пожалуйста, утилизируйте литиевые аккумуляторы в специализированных местах.

Перед утилизацией прибора извлеките из него аккумулятор.

Перед извлечением аккумуляторов отключите электропитание.

Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом.

## Этапы извлечения аккумулятора



С помощью плоской отвертки аккуратно приподнимите внешнее кожаное покрытие.



Открутите болты и снимите пластиковую крышку.



Перережьте кабели аккумулятора и извлеките его.

Появление неисправности	Возможные причины	Возможные решения
Прибор не включается	Выключатель питания отключен	Включите выключатель питания
	Разряженная батарея	Зарядите аккумулятор
	Истек период работы по умолчанию	Нажмите кнопку включения, чтобы перезапустить массажер
Прибор не заряжается	Неправильно подсоединен штекер питания	Повторно подключите штекер
Индикатор гаснет или мигает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Низкое давление воздуха		

- Если проблема сохраняется, отключите питание и обратитесь к авторизованному дилеру для проведения технического обслуживания.

Название: Массажер для глаз

Модель: Aniq

Номинальное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 5 Вт

Номинальная частота: 50/60 Гц

Конструктивная безопасность: III

Изготовитель:

SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY  
CORPORATION LIMITED (ШАНХАЙ РОНГТАЙ ХЕЛФ  
ТЕХНОЛОДЖИ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД).

Место нахождения:

China, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai  
(Китай, № 1226, Жуфенг Род, Куингку, Шанхай).

Сделано в Китае.

