



W H A L T I M A

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ



Модель:
RAB1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЕАС

Благодарим Вас за покупку данного товара. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя перед использованием, чтобы убедиться в правильной установке и эксплуатации.





При последующем использовании, пожалуйста, применяйте данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ	
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ.....	4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
Предварительные проверки.....	4
Способы зарядки.....	4
Руководство по эксплуатации.....	4
После использования.....	5
УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ХРАНЕНИЕ.....	5
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▶ Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием.
- ▶ Меры предосторожности и предупреждения, перечисленные ниже, помогут обеспечить правильную работу данного прибора.
- ▶ В колонках ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО перечислены проблемы, вызванные неправильным использованием прибора. Внимательно прочтите все колонки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО ниже и следуйте инструкциям в данном руководстве.

 Предупреждение	Неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам пользователей.
 Осторожно	Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или повреждению прибора.
 Запрещено	 НЕ разбирать


Не подходит для категории лиц ниже

Лицам, указанным ниже, мы рекомендуем

проконсультироваться с врачом перед использованием.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none">◆ Лицам с имплантированным кардиостимулятором или электронными устройствами.◆ Лицам, проходящим лечение, особенно при ухудшении состояния.◆ Лицам со злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, гипертонией, гипотонией или сердечными заболеваниями (которым требуется наблюдение врача).◆ Лицам, принимающим препараты. Беременным женщинам или в период менструации.◆ Лицам с остеопорозом, деформацией суставов, дисфункцией или недавним переломом.◆ Лицам с серьезными травмами или кожными заболеваниями.◆ При сильной температуре.◆ При использовании прибора детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями требуется тщательное наблюдение.◆ Лицам с инфекционными заболеваниями или имплантированными электронными устройствами.◆ Лицам с серьезными кожными заболеваниями или травмами не следует использовать прибор.◆ Прибор оснащен функцией нагрева, на это следует обратить внимание людям с пониженной сенсорной способностью (требуется наблюдение).
--	--

Меры предосторожности при работе с контроллером


 ОСТОРОЖНО	<ul style="list-style-type: none">◆ Не работать с контроллером мокрыми руками и не тянуть за провод контроллера с силой.◆ Не проливать воду или другую жидкость на контроллер во избежание неисправности.◆ Не класть на контроллер тяжелые предметы.
--	--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Для эффективной эксплуатации

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не использовать прибор при температуре выше 40°C.◆ Не использовать прибор во влажной, мокрой или пыльной среде.◆ Не использовать прибор и не отключать его от розетки во время грозы или грозовых разрядов.◆ Не оставлять на улице.◆ Всегда класть прибор на ровную поверхность.◆ Не хранить вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами. Не мочить прибор в воде.◆ Не использовать прибор рядом с коротковолновыми или микроволновыми приборами.
--	---



Разъемы питания и шнур питания. Меры предосторожности

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Убедитесь, что напряжение питания, указанное в паспорте, соответствует вашему локальному источнику питания.◆ Не брать прибор мокрыми руками для отсоединения шнура питания во избежание поражения электрическим током.◆ Не тянуть шнур, дотянуться до переднего пластмассового конца датчика, чтобы отсоединить его.◆ Не сжимать шнур питания бытовыми электроприборами или другими тяжелыми предметами.◆ Не следует повреждать, перегибать, сильно тянуть и перекручивать шнур питания.◆ Использовать соответствующий адаптер, обратиться к поставщику или квалифицированному специалисту для замены.◆ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или соответствующим компетентным лицом во избежание опасности.
--	--


Рекомендации по безопасному использованию

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не ставить тяжелые предметы на прибор.◆ Не использовать другие средства терапии вместе с прибором.◆ Не класть на прибор тяжелые предметы.◆ Использовать прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.◆ Прибор должен использоваться только одним человеком. Двое или более людей не могут использовать прибор во избежание его повреждения.◆ Не использовать прибор сразу после еды, это может вызвать дискомфорт.◆ При малейших признаках дискомфорта во время работы с прибором следует сразу же прекратить его использование.◆ Настоятельно рекомендуется использовать прибор не менее 10 минут.◆ Не использовать прибор во время вождения во избежание аварии.◆ После длительной работы прибор может нагреваться.◆ Если питание отключается во время зарядки, выключите прибор во избежание опасности при повторном включении питания.◆ Перед использованием снять все украшения или другие предметы, которые могут помешать массажу.◆ Не использовать прибор в горизонтальном положении или полулежа.
 <p>ЗАПРЕЩЕНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не использовать прибор, если имеются повреждения/открытые части или утечка питания.◆ Не вставать на прибор и не ставить на него тяжелые предметы.◆ Не давать прибор детям.◆ Не засыпать при работающем приборе.◆ Не использовать прибор после приема алкоголя.◆ Не вставлять пальцы или посторонние предметы в отверстия прибора во избежание травм пользователя или повреждения прибора.◆ В случае возникновения задымления или странных запахов во время работы сразу же прекратить использование.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 <p>НЕ РАЗБИРАТЬ</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Не разбирать прибор самостоятельно во избежание выхода прибора из строя.◆ Не пытаться ремонтировать или разбирать прибор без разрешения. Пожалуйста, свяжитесь с нами или авторизованным сервисным центром.
 <p>ОТСОЕДИНИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Перед обслуживанием вытащите шнур питания из удлинителя. Никогда не подключайте и не вытаскивайте шнур питания мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травм.◆ Вытащите шнур питания из удлинителя при полной зарядке.◆ Извлеките вилку из розетки при отключении питания, выключите все элементы управления.

Рекомендации по безопасному использованию

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Использовать прибор только на специально предназначенных участках тела.◆ Не давить на сердце во время использования во избежание неприятных ощущений.◆ Не использовать прибор долго во избежание неприятных ощущений.◆ Правильно утилизировать упакованные пластиковые пакеты, убирать от детей.◆ Не накрывать прибор ковриками или подушками во время использования во избежание перегрева или возгорания.◆ Не использовать прибор на влажной или мокрой коже.
--	--


Руководство по использованию аккумулятора

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Прибор содержит специальный аккумулятор, не вынимайте его из прибора для зарядки и не используйте с другими приборами.◆ Не оставлять прибор рядом с открытым огнем во избежание перегрева.◆ Пожалуйста, соблюдайте инструкции во время работы с прибором во избежание повреждений.◆ Не соединяйте две клеммы аккумулятора напрямую с токопроводящим металлом.◆ Не храните прибор с украшениями или шпильками для волос.◆ Извлеченный аккумулятор следует тут же убрать в недоступное для детей место во избежание травм.◆ Немедленно обратитесь к врачу, если ребенок проглотил аккумулятор.◆ Если произошла утечка из аккумулятора, избегайте контакта с кожей во избежание химических ожогов.◆ В случае контакта с поврежденным аккумулятором тщательно промойте кожу водой.◆ При контактах с кожей тщательно промойте пораженные участки и немедленно обратитесь к врачу.◆ Разбирать прибор только для утилизации, обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр для обслуживания.◆ Аккумуляторы могут быть утилизированы после использования, пожалуйста, утилизируйте литиевые аккумуляторы через локальные программы.◆ Перед утилизацией прибора извлеките аккумуляторы из прибора.◆ Перед извлечением аккумулятора отключите блок питания.◆ Утилизируйте аккумуляторы должным образом.
---	--

Утилизация аккумулятора

Перед утилизацией прибора извлеките аккумулятор из прибора.

Выполните следующие действия:

 <p>ОСТОРОЖНО</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Отключите внешний источник питания, снимите корпус прибора и отключите аккумулятор.
--	---


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- ◆ Извлеките аккумулятор.
- ◆ Утилизируйте аккумулятор в специально отведенных пунктах переработки.
- ◆ Пожалуйста, соблюдайте локальные законы об охране окружающей среды и правила утилизации отходов для защиты окружающей среды.

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Состав прибора

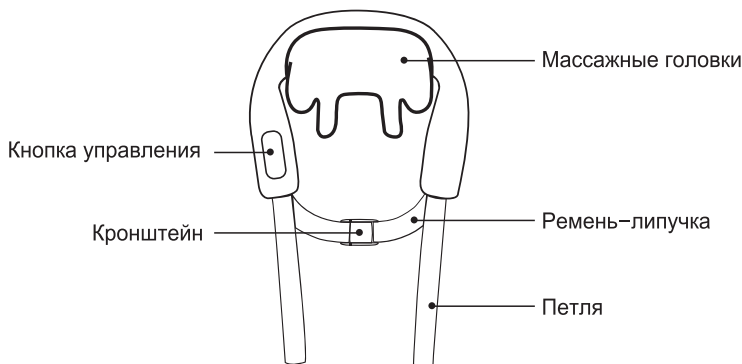


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительные проверки

- ◆ Перед использованием проверить, нет ли повреждений прибора.
- ◆ Убедитесь, что все детали на месте.


Способы зарядки

- ◆ Вставьте вилку зарядного кабеля в разъем для зарядки прибора. (См. правую картинку)
- ◆ Когда уровень заряда аккумулятора ниже 20%, индикатор постоянно горит красным светом.
- ◆ После завершения зарядки на индикаторе загорится белый цвет.
- ◆ Во время работы прибора индикатор постоянно показывает белый цвет. Во время зарядки мигает красная лампочка.
- ◆ Во время зарядки прибор и адаптер питания могут немного нагреваться.
- ◆ Прибор нельзя использовать во время зарядки.
- ◆ Когда прибор находится в рабочем состоянии и подключен к источнику питания для зарядки, он активизирует программу самозащиты и автоматически прекращает работу.

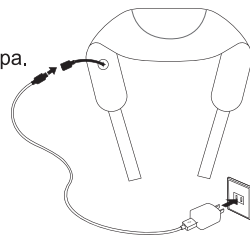

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации

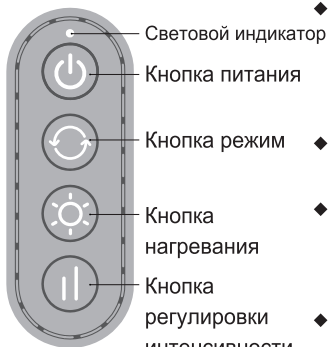

- ◆ **Кнопка питания:** Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы начать массаж. Рабочее время по умолчанию составляет 10 минут. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить массажер.
- ◆ **Кнопка режим:** В рабочем режиме по умолчанию нажмите эту кнопку для переключения между режимами 1 и 2.
- ◆ **Кнопка нагревания:** В рабочем режиме по умолчанию нажмите эту кнопку, чтобы последовательно переключать режим нагрева: слабый нагрев, выключить нагрев, сильный нагрев, циклический.
- ◆ **Кнопка регулировки интенсивности:** В рабочем состоянии по умолчанию нажмите эту кнопку для переключения между уровнями интенсивности 1 и 2.

После использования

- ◆ Когда прибор не используется, нажмите и удерживайте кнопку питания до полного отключения прибора и храните его в безопасном месте во избежание повреждений. Убедитесь, что все части подключены.
- ◆ Если прибор не используется в течение длительного времени, уберите его в чехол.



ОСТОРОЖНО

- ▶ Не работать с контроллером мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или повреждения контроллера.
- ▶ Убедитесь, что вода или другая жидкость не попадают в контроллер во избежание неисправности.
- ▶ Выключить питание и отключить массажер от электрической розетки, если он не используется, чтобы дети случайно не включили массажер.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ХРАНЕНИЕ

Рекомендации по уходу

1. Очистка

- ◆ Перед очисткой обязательно выключите питание и отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- ◆ Используйте мягкую ткань для очистки прибора.
- ◆ Для удаления пятен протрите пятно тканью с небольшим количеством воды или мягким нейтральным моющим средством, затем протрите другой тканью.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Категорически запрещено подключать прибор или вытаскивать шнур питания мокрыми руками.
- ▶ Не следует мыть прибор водой и не допускать попадания воды или другой жидкости на прибор.
- ▶ Не использовать бензол, разбавитель или другие растворители при работе с прибором, это может привести к выцветанию или повреждению прибора.
- ▶ Не следует демонтировать прибор самостоятельно. Влажный прибор необходимо сначала высушить.

2. Способы хранения

- ◆ Обязательно отключите питание перед хранением.
- ◆ Поместите прибор в среду, свободную от влаги, высокой температуры и летучих газов.
- ◆ Если прибор не используется в течение длительного времени, мы рекомендуем упаковать его в коробку, чтобы защитить его от пыли. Время от времени заряжайте аккумулятор, чтобы продлить срок службы.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Не оставлять прибор под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Это может привести к выцветанию или повреждению.

При нагревании

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте отсутствие наличия следующих признаков:

- ◆ Запах гари.
- ◆ Питание включается и выключается при прикосновении к кабелю питания.
- ◆ Зарядный кабель нагревается или поврежден.
- ◆ Другие аномальные признаки.

ОСТОРОЖНО

- ▶ Прекратите использовать прибор во избежание поломок или несчастных случаев, если присутствуют какие-либо из вышеперечисленных признаков.
- ▶ Отключите питание и выньте вилку из розетки, обратитесь к нам или в сервисный центр.
- ▶ Все остальные услуги, за исключением вышеуказанного обслуживания и технического обслуживания, находятся в компетенции авторизованного дилера или сервисного центра. Не разбирайте прибор самостоятельно во избежание выхода прибора из строя.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Внешние признаки	Возможные причины	Возможные решения
1	Шум во время использования	Это нормально и происходит из-за работающих механических частей	Не нужно предпринимать никаких мер
		Внутренние детали не закреплены	Необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр
2	Прибор не запускается	Кнопка питания находится в положении «выкл».	Включите кнопку питания
		Прибор перегружен, защита от перегрева отключает питание	Нажмите кнопку питания после остывания для перезапуска
		Аккумулятор разряжен	Использовать после полной зарядки
3	Прибор перестает работать во время использования	Таймер по умолчанию выключен	Нажмите кнопку питания через 15 минут, чтобы осуществить перезапуск
		Электричество отключено	Зарядите аккумулятор и перезапустите
4	Во время работы появляется дым или необычный запах	Прибор неисправен	Немедленно прекратить использование и обратиться в авторизованный сервисный центр
5	Нет признаков зарядки	Нет признаков зарядки	Подсоединить шнур зарядного устройства

Если проблема не устранена, обратитесь к нам или в авторизованный сервисный центр для обслуживания.

Советы: Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, наша компания не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненные неавторизованным обслуживанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия: Массажер для шеи и плеч

Модель: Rabi

Номинальное напряжение: 5 В ---

Номинальная мощность: 9 Вт

Емкость аккумулятора: 2500 мАч

Производитель: Шанхай Айронгда Фитнес Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 1226 Жуфен Роуд, район Цинпу, Шанхай

Shanghai Airongda Fitness Technology Co., Ltd

No.1226 Zhufeng Road, Qingpu, Shanghai, China

Не выбрасывайте данную инструкцию.

Внешний вид товара может не совпадать с изображением. Настоящая инструкция прошла тщательную редакцию и проверку, что, однако, не исключает наличие ошибок при составлении и печати. Заранее приносим извинения за возможное недопонимание. Право конечного толкования принадлежит Компании.

Настоящая инструкция является дословным переводом и отображает информацию, заявленную производителем



Неправильная утилизация отходов может нанести вред окружающей среде.



W H A L T I M A